

维曼（Weinmann）急救呼吸机清洁消毒指南

消毒过程：

1. 拆解：请根据使用说明拆卸设备的各个组件，并妥善处理一次性用品。
2. 清洁：请根据设备维护图表清洁设备及其组件，提示：为了方便清除血渍、分泌物及污染物，可将组件稍作浸泡，并清除残留的清洁剂。
3. 消毒：请根据设备维护图表以及消毒图表对设备及其组件进行消毒。消毒后，请用清水将各个部件进行彻底冲洗（最低为饮用水标准）
4. 干燥：请让设备及其组件自然风干，避免热源和阳光直射，请勿使用压缩空气干燥某些精细组件。
5. 灭菌：清除残留的清洁剂和消毒剂。根据设备维护图表对设备及其组件进行灭菌处理。高温高压消毒请参照生产厂商的说明。
6. 组装及检测设备：清洁消毒后，根据说明检测各个组件，组装设备，根据使用说明检测设备功能，如有必要，进行相关记录。

基本信息

- 本指南依据国际医疗器械消毒标准制定。
- 禁止对一次性组件进行二次处理，请妥善处理一次性组件，一次性组件具有明确的 ② 标识。清洁、消毒和灭菌请仔细参阅消毒剂制造商的产品资料和医疗设备的使用说明。
- 我们设备不适合超声清洗消毒。
- 为了更好地监控医疗设备的使用寿命，我们建议您对设备的维护进行妥善记录。
- 如果你的消毒方法与所建议的方式不同，请咨询相关技术人员。
- 请仔细操作，不当的操作会损坏设备及部件的使用寿命。请遵守安全操作指示。

附加信息

本指南符合罗伯特·科赫研究所颁发的医疗器械(RKI)指导方针。

本指南符合 VAH(Verbund 《应用卫生》) 指导方针。